

SD-120T 全自动母乳分析仪是一款高效的乳汁成分分析仪，可综合分析人体乳汁中的多种营养成分（如脂肪、蛋白质、乳糖、矿物质、能量、密度、水分）以确定母乳的营养物质是否能够满足婴儿的营养需求，并且可以通过母乳分析了解母亲不同饮食结构下对母乳营养成分的影响，通过调整饮食，让母乳的营养更优质的提供给婴儿。

SD-120T 全自动母乳分析仪采用先进的分析技术，使分析结果具有高准确性和可靠性；仪器操作简单，操作时查看仪器操作说明书即可轻松完成操作；在检测之前不需要对样品进行人工均质化，本产品特有的搅拌功能能更好的实现样本自动均质化；仪器采用软件全自动管理，集自动清洗、自动取样等特点于一身，只需要您简单的操作电脑，即可得到所需要的检测结果。我们希望 SD-120T 全自动母乳分析仪能够成为您轻松工作的最佳帮手。

在各级医院、妇幼保健院和母乳喂养咨询门诊中，SD-120T 全自动母乳分析仪是您完美的选择，它高效的性能将为您提供更好的服务。本公司愿与全国妇幼保健工作者携手共创，为把我国母婴保健工作推向新的高度贡献力量。

重 要 提 示

1. 操作仪器之前请仔细阅读本手册，并按照说明操作仪器。
3. 操作仪器时请将仪器放置在水平桌面上，避免桌面的振动。

4. 擦拭仪器时，请关闭电源，防止有水渗入到仪器内部造成短路。
5. 请勿拆开仪器以避免损坏设备, 如果仪器出现故障，请联络地方经销商。
6. 清洗不当可能会导致仪器内部管路堵塞，使液体流入仪器内部，致使主板电路烧毁。由于清洗不当造成的仪器损坏，由用户自行承担责任！
7. 请将仪器放置在10℃～40℃的通风环境内运行。
8. 请勿在强电磁环境下使用，以避免影响仪器的性能。
9. 请勿将其它物品放置在仪器表面。